

céru calm™

FR **Solution auriculaire**

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.

1. Qu'est-ce que CÉRUCALM™ Solution auriculaire et dans quels cas est-il utilisé ?

CÉRUCALM™ Solution auriculaire est un dispositif médical à action mécanique. Avec ses propriétés lubrifiantes, émoullientes, protectrices et apaisantes, il est indiqué aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant pour prévenir et aider au traitement des irritations et inflammations du conduit auditif externe comme les mycoses, l'eczéma, les dermatites, les otites externes (" oreille du nageur "). En cas de facteurs environnementaux (climat chaud et humide, climatisation, eau chlorée ou eau de mer) ou d'agents pathogènes externes, les extraits huileux et le glycérol végétal contenus dans CÉRUCALM™, avec leurs actions émoullientes et protectrices, préviennent l'otite et l'inflammation du conduit auditif externe, et rendent le produit hautement recommandé, par exemple, lors de la pratique de sports nautiques, tant en mer qu'en piscine.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CÉRUCALM™ Solution auriculaire ?

Ne pas utiliser en cas :

- d'hypersensibilité connue à l'un des composants du produit (mentionnés dans la rubrique 6).
- de perforation confirmée ou suspectée de la membrane tympanique.

3. Comment utiliser CÉRUCALM™ Solution auriculaire ?

Appliquer 3-4 gouttes deux fois par jour pendant 5-7 jours ou selon différents avis médicaux.

Faire preuve d'attention au moment de l'instillation pour éviter les traumatismes causés par un contact accidentel avec le compte-gouttes.

4. Avertissements

En cas d'effets indésirables, veuillez interrompre l'utilisation du produit et consulter un médecin.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue ou d'allergie individuelle à l'un des composants du produit (mentionnés dans la rubrique 6).

Consultez un médecin en cas de blessures confirmées ou suspectées du conduit auditif externe et/ou de la membrane tympanique.

Le produit peut causer une légère sensation de démangeaison dans les 15 minutes suivant l'application, si appliqué sur une peau lésée.

Assurez-vous que l'emballage et/ou le flacon soit intact avant de l'utiliser.

Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au produit intact et correctement conservé.

Utilisez le produit pour un seul patient.

Évitez tout contact avec les yeux.

Ne pas ingérer.

Ne pas appliquer le produit en même temps que l'application de médicaments ou d'autres produits à usage topique.

5. Comment conserver CÉRUCALM™ Solution auriculaire ?

- Conserver hors de la portée et de la vue des enfants.
- Bien refermer le flacon après utilisation.
- Conservez à une température inférieure à 25 °C.

6. Autres informations

Composition : Propylène glycol, glycérol, climbazole, glycyrrhizinate dipotassique, acide acétique, allantoiné, Extraits huileux (Origanum Vulgare, Thymus Vulgaris, Cinnamomum Zeylanicum, Olea Europaea, Rosmarinus Officinalis, Mentha Piperita, Lavandula Angustifolia, Hydrastis Canadensis, Citrus Limonum), eau purifiée.

Flacon de 15 mL

Révision 02/2021



Fabricant / Hersteller / Fabrikant:

DMG

DRUGS MINERALS AND GENERICS ITALIA SRL

Via Laurentina, km 26,700 - 00071 Pomezia, Rome

- Italy - www.dmgit.com

CE 0477



BAUSCH + LOMB

®/TM are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

© 2022 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

Information médicale: + 33 (0) 467 12 30 30

P1FRBX02
335E07-02.22

Date de mise à jour du texte : Mars 2022