

cérudrop+™

Solution auriculaire

Veillez lire attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

1. Qu'est-ce que Cérudrop+™ et dans quels cas est-il utilisé ?

Le cérumen est une substance s'apparentant à la cire, de couleur brun-jaune, produite par des glandes situées dans le conduit auditif afin de lubrifier, protéger et nettoyer ce dernier.

Le cérumen et les particules piégées dans le conduit auditif se déplacent ainsi le long du conduit de l'oreille, jusqu'à son ouverture, où ils sont expulsés.

Chez certaines personnes, ce cérumen peut s'accumuler, pouvant entraîner une douleur dans l'oreille ou une perte partielle de l'audition.

Les gouttes auriculaires **Cérudrop+™** contiennent du glycérol qui ramollit le cérumen et du peroxyde d'urée qui libère de l'oxygène pour briser les dépôts de cérumen durcis.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Cérudrop+™ ?

Contre-indications et mises en garde

N'utilisez pas les gouttes auriculaires **Cérudrop+™** si :

- votre tympan a été endommagé ou perforé, ou si vous souffrez d'une infection ou tout autre problème lié à vos oreilles (eczéma, démangeaisons, dermatite ou autre problème cutané local),
- vous êtes sensible à l'un des ingrédients énumérés ci-dessus.

3. Comment utiliser la solution auriculaire Cérudrop+™ ?

- Penchez la tête sur le côté de façon à orienter l'oreille traitée vers le haut et pressez le flacon pour faire tomber 3 à 6 gouttes de **Cérudrop+™** dans l'oreille.
- Gardez la tête inclinée pendant quelques minutes pour permettre aux gouttes de pénétrer dans le cérumen.
- Gardez les gouttes dans l'oreille pendant quelques minutes, puis rincez à l'eau tiède ou solution de lavage pour éliminer le cérumen restant.
- Essuyez l'excédent de gouttes dans l'oreille à l'aide d'un mouchoir en papier ou d'un coton.
- Répétez le traitement 1 ou 2 fois par jour pour éliminer le cérumen, ou 1 fois par semaine pour prévenir l'accumulation de cérumen.
- La durée de traitement est comprise entre 3 et 6 jours, après ce délai une amélioration devrait être constatée.

Lorsque le cérumen commence à ramollir, avant d'être retiré, il peut gonfler légèrement, ce qui peut donner une sensation de plénitude dans l'oreille, affecter temporairement l'audition et, occasionnellement, provoquer de légers vertiges ou affecter l'équilibre. Une sensation temporaire de fourmillement peut se produire.

Si ces symptômes persistent ou s'aggravent, ou si vous ressentez d'autres effets secondaires ou une sensation de brûlure, arrêtez l'utilisation des gouttes auriculaires **Cérudrop+™** et demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Avertissements

- Les enfants doivent avoir reçu l'avis d'un professionnel de santé avant d'utiliser la solution auriculaire, afin de vérifier la présence de bouchon de cérumen.
- La solution auriculaire **Cérudrop+**[™] doit être uniquement utilisée dans l'oreille.
- Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
- Ne pas utiliser si le tympan a été endommagé ou perforé, en cas d'infection ou de tout autre problème lié aux oreilles (eczéma, démangeaisons, dermatite ou tout autre problème cutané local).
- Ne pas avaler.
- Ne pas utiliser si vous êtes sensible à l'un des ingrédients.
- Ne pas utiliser en même temps que d'autres traitements auriculaires.
- Ne pas insérer des prothèses auditives immédiatement après l'utilisation, attendre 15 minutes afin que tout résidu soit éliminé.
- S'assurer de l'intégrité de la bague d'inviolabilité avant la première utilisation.

Tout incident grave survenu avec le dispositif médical devrait être notifié immédiatement à East Midlands Pharma Ltd et à l'ANSM

**TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR USAGE EXTERNE UNIQUEMENT.**

5. Comment conserver Cérudrop+[™] ?

- Ne pas stocker au-dessus de 25°C.
- Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur la boîte et à la base du flacon.
- À utiliser dans les 30 jours suivant la première ouverture. Inscrivez la date de la première application sur la boîte (à l'endroit désigné). Après utilisation, éliminez l'emballage conformément à la réglementation locale.

6. Autres informations

Composition : Glycérol BP, Peroxyde d'hydrogène d'urée 5%.

 Advena Ltd. Tower Business Centre,
2nd Flr., Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta

 East Midlands Pharma Ltd, Unit 2a, Old Dalby Business Park,
Leicestershire LE14 3NJ. UK.



Cerudrop+ is a trademark of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

© 2021 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates

04/2021

BAUSCH + LOMB

Information médicale : + 33 (0) 4 67 12 30 30

P1FR01/ 554E01-06.21