

céruprotect™

Solution pour pulvérisation auriculaire

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit.

1. Qu'est-ce que Céruprotect™ et dans quels cas est-il utilisé ?

Céruprotect™ est un dispositif médical destiné à créer une barrière de protection contre les facteurs environnementaux extérieurs (par exemple, l'eau). Il permet à la fois d'hydrater et d'apaiser le conduit auditif.

Céruprotect™ :

- aide à la prévention des otites
- atténue le gonflement du conduit auditif et possède des propriétés astringentes,
- aide à maintenir une humidité optimale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Céruprotect™ ?

Contre-indications et mises en garde

N'utilisez pas **Céruprotect™** :

- si le récipient a été endommagé,
- si vous avez un tympan perforé (par exemple, en cas d'otite moyenne chronique),
- si vous avez déjà eu une réaction allergique à l'un des composants du produit,
- si vous avez subi récemment une opération ou une intervention chirurgicale pratiquée sur l'oreille,
- après la date de péremption imprimée sur la boîte,
- chez les enfants de moins de 24 mois.


Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses de la bouche, de la gorge et du nez.

Utilisation avec d'autres médicaments / dispositifs médicaux

Les interactions avec d'autres produits n'ont pas été étudiées. Lors de l'application de la solution auriculaire, il n'est pas recommandé d'utiliser d'autres médicaments, dispositifs médicaux ou gouttes auriculaires pendant au moins 30 minutes.

3. Comment utiliser la solution auriculaire Céruprotect™ ?


Avant votre première utilisation, secouez le flacon pendant au moins 5 secondes. Cela permettra de former une suspension homogène. Ensuite, appuyez sur la pompe 3-4 fois jusqu'à ce que vous obteniez une fine pulvérisation (image A). Veillez à ne pas diriger la buse vers vous.

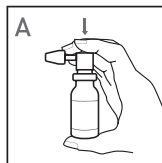

Cette procédure prépare le système de dosage pour la première application.

Afin d'obtenir les résultats les plus efficaces, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- La solution auriculaire liquide **Céruprotect™** est destinée à être administrée dans le conduit auditif externe.
- Bien agiter pendant 5 secondes avant utilisation afin d'obtenir une suspension homogène.
- Au moment d'appliquer la solution, tirez doucement le pavillon de l'oreille vers le haut et l'arrière (photo B).

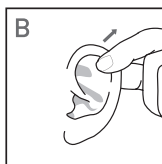


Placez délicatement l'embout dans l'oreille, tenez-le en position verticale et appuyez sur la pompe (photo C).

- Après l'application, massez le tragus (petite structure de la surface du pavillon de l'oreille, également appelé auricule) en partant de l'extérieur.

- Répétez pour l'autre oreille.

- Après l'application, retirez la pompe et rincez-la à l'eau chaude.

- Laissez la pompe sécher et remettez-la en place.

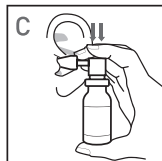

POSOLOGIE

Pour aider à la prévention d'otite

- Enfants de plus de 24 mois jusqu'à 12 ans : 1 pulvérisation pour chaque oreille, 2-3 fois par jour (le jour de l'exposition). Utilisez uniquement sous la surveillance d'un adulte.

- Enfants de plus de 12 ans et adultes : 1 pulvérisation pour chaque oreille, 3-4 fois par jour (le jour de l'exposition).

Consultez un médecin si votre état s'aggrave ou ne s'améliore pas après 14 jours de traitement.

Céruptect™ ne peut pas être utilisé chez les enfants de moins de 24 mois.

Pour usage externe uniquement.

4. Avertissements

Si vous observez un quelconque effet secondaire, signalez-le à votre médecin ou à votre pharmacien.

Céruptect™ ne doit être utilisé que conformément aux instructions spécifiées dans la notice.

Tout incident grave survenu avec le dispositif médical devrait être notifié immédiatement à EmergoPharm Sp.z o.o. Sp.K. et à l'ANSM.

5. Comment conserver Céruptect™ ?

- À conserver dans un endroit sec, en position verticale et à une température comprise entre 15 °C et 25 °C.

- Protéger du gel et ne pas stocker dans le réfrigérateur.

- Protéger de la lumière directe du soleil.

- Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

- Après ouverture le produit peut être utilisé pendant 3 mois.

Après utilisation, éliminez l'emballage conformément à la réglementation locale.

6. Autres informations

Céruptect™ est un dispositif médical de classe I.

Conditionnement : Le récipient multidose contient 10 mL net ce qui représente environ 200 doses uniques. Le récipient n'est pas pressurisé. L'apparition de particules non dissoutes est un aspect normal et ne doit pas être considérée comme un défaut.

Composition : Huile d'olive purifiée, glycérol, complexe d'acide glycyrrhétinique, totarol, huile de géranium, huile d'arbre à thé, huile de citron, huile d'origan, huile de lavande, huile de menthe, huile de romarin, extrait d'hydraste.



EmergoPharm Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Józefa Piłsudskiego 11, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Pologne



Ceruprotect is a trademark of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

© 2022 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates

Rev. 07.2022



NOTICE



BAUSCH + LOMB

Information médicale : +33(0)467123030

P1FR01/570E01-05.22
07.2022A_FR_IFU