

PRECAUTIONS D'EMPLOI :



- Ne pas utiliser en cas de corps étrangers dans l'oreille, d'otites, de perforation tympanique, chez les porteurs d'aérateur transtympanique (yoyo).
- Ne pas introduire trop profondément l'embout dans le conduit auditif afin de ne pas l'irriter.
- En cas de douleur au niveau de l'oreille, consultez votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES :

Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 36 mois.

Lorsqu'il est utilisé comme recommandé, il n'y a pas de contre-indication ou d'effet secondaire connus.

PRESENTATION :

Flacon pulvérisateur de 50 mL.

CONSERVATION / STOCKAGE :

CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Ne pas utiliser la solution au delà de la date de péremption.

Attention

Réceptif sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Tenir hors de portée des enfants.

50 mL

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,

des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.

Ne pas fumer. Protéger du rayonnement Solaire.

Ne pas utiliser si le produit est endommagé.

Conserver dans l'emballage d'origine à une température maximale de 25 °C.

Tout incident grave survenu avec le dispositif médical doit être notifié immédiatement au fabricant et à l'ANSM.

130E10-07.23 - P1FR08

Date de révision : 06/2023

Céruspray est un nom de marque de Bausch & Lomb Incorporated ou d'une de ses filiales.

© 2023 Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.

90



CE 0459 MD



BAUSCH + LOMB
LABORATOIRE CHAUVIN

Laboratoire Chauvin
416 rue Samuel Morse - CS 99535
34961 MONTPELLIER - FRANCE
Information médicale : + 33 (0) 4 67 12 30 30

ANA 90BH1009E

céruspray™

Solution pour pulvérisation auriculaire

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL AUDITIF :

L'oreille est un organe composé de trois grandes parties distinctes, qui permettent l'audition.

Partie visible de l'oreille externe, le pavillon auriculaire a pour fonction de recueillir et diriger les sons vers le conduit auditif.

Ce conduit relie le pavillon au tympan et assure la diffusion des sons. Ces derniers, amplifiés par la membrane tympanique, sont ensuite transmis à la partie interne de l'oreille puis transformés en impulsions nerveuses qui partent au cerveau pour décodage.



Le cérumen est une substance physiologique très grasse, de couleur jaune-brun, sécrétée par les glandes sébacées sur toute la longueur du conduit auditif externe.

A QUOI SERT LE CERUMEN ?

Dans les conditions normales, le cérumen assure une protection du canal auriculaire contre les infections. Il permet aussi d'éliminer les poussières vers l'extérieur du conduit auditif externe.

En principe, le cérumen s'écoule naturellement vers l'extérieur du conduit auditif externe.

Dans certains cas, une production excessive de cérumen ou une mauvaise hygiène peut provoquer la formation d'un dépôt, appelé bouchon de cérumen qui altère le bon fonctionnement de l'oreille et cause des troubles gênants : démangeaisons, bourdonnements, douleurs légères, baisse d'audition.

COMMENT S'ASSURER D'UNE BONNE HYGIENE DU CONDUIT AUDITIF ?

Dans les cas de production excessive de cérumen, il convient d'avoir une hygiène régulière du conduit auditif externe à travers l'utilisation de produits non agressifs.

QU'EST-CE QUE CERUSPRAY™ ?

CERUSPRAY est une solution de lavage ionique non agressive enrichie de tensio-actifs qui facilite l'élimination des résidus de cérumen et qui, utilisée régulièrement, évite la formation de bouchon.

QUE CONTIENT CERUSPRAY™ ?

Polysorbate 80	0,5 g
Sodium bicarbonate	5,0 g
Sodium chlorure	3,5 g
Eau purifiée qsp	100,0 mL

POUR QUI EST CONSEILLE CERUSPRAY™ ?

- Pour les personnes ayant une production irrégulière de cérumen.
- Pour les personnes travaillant dans un milieu poussiéreux.
- Pour les personnes qui sont exposées aux écarts de pression atmosphérique (plongeurs, alpinistes, personnes voyageant ou travaillant en avion).

QUAND UTILISER CERUSPRAY™ ?

Pour l'hygiène et pour LES PERSONNES SUJETTES AUX BOUCHONS DE CÉRUMEN : 1 pulvérisation de CERUSPRAY™, dans chaque oreille 2 à 3 fois par semaine.

EN CAS DE BOUCHON DE CÉRUMEN :

- (1) Utiliser une solution auriculaire céruménolytique pour dissoudre le bouchon.
- (2) Appliquer 2 à 3 pulvérisations de CERUSPRAY™ pour favoriser l'écoulement des débris de cérumen.

MODE D'EMPLOI DE CERUSPRAY™ :



- 1**
Ôter le capuchon du flacon



- 2**
Mettre en place l'embout sur le flacon



- 3**
Presser l'embout pendant une seconde en tenant l'aérosol droit à l'entrée de l'oreille



- 4**
Incliner la tête sur le côté afin de favoriser l'écoulement des liquides et éventuels résidus de cérumen



- 5**
Renouveler si nécessaire



- 6**
Essuyer avec un tissu propre



- 7**
Passer l'embout sous l'eau tiède après chaque utilisation